



9Solutions eTag Companion 9S-TAG-05-04 – Patienten-Notruftaster

9Solutions eTag Companion ist ein einfach zu bedienender Echtzeit Lokalisierungs-Notruftaster für Bewohner in Pflegeeinrichtungen und Patienten in Krankenhäusern.

- ✓ eTag Companion ist komfortabel zu tragen und wasserdicht gemäß IP67 (Dusche)
- ✓ eTag Companion wird zusammen mit Systemen von 9Solutions in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und in der Hauskrankenpflege eingesetzt
- ✓ eTag Companion verfügt über zwei farbige, programmierbare Tasten und ein Ruf-Bestätigungslicht
- ✓ Mit der Touch-To-Sign-Funktion erhält der Patient eine Rückbestätigung seines Rufes
- ✓ Standardmäßig wird der eTag Companion mit Armband ausgeliefert



Technische Informationen	
Produktnummer	9S-TAG-05-04
Tasten	2
LED-Anzeige	1
Schutzart	IP67 (Dusche)
Gewicht	15 g
Abmessungen	42 x 9,5 mm (ø x h)
Batterie-Lebensdauer	ca. 1-2 Jahre (betriebsabhängig)
Batterietyp	CR2450 Lithium Batterie
Frequenz	Bluetooth, 2.4 GHz, ISDM Band 2400-2483,5 MHz
Ausgangsleistung	4 dBm
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Zubehör	
Armband (permanent)	9S-ACC-01-14



Aktivierung und Deaktivierung der Zugangskontrolle der eTags zu einem Gate

Mit eTag Pro und eTag Companion wird eine Zugangskontrolle mit folgender Druckfolge **aktiviert: 4–3–2–2**.

Mit eTag Pro und eTag Companion wird eine Zugangskontrolle mit folgender Druckfolge **deaktiviert: 4–3–2–3**.


Am **eTag Pro** ist dafür die **blaue Taste** zu drücken, am **eTag Companion** ist die **graue Taste** zu drücken.

Aktivierung

1. Drücken Sie die kleine Taste viermal – die **grüne LED** leuchtet auf
2. Drücken Sie die kleine Taste dreimal – die **grüne LED** leuchtet auf
3. Drücken Sie die kleine Taste zweimal – die **grüne LED** leuchtet auf
4. Drücken Sie die kleine Taste zweimal – die **rote LED** leuchtet auf
5. Testen Sie mit dem eTag die Zugangskontroll-Funktion an einem Gate

Deaktivierung

1. Drücken Sie die kleine Taste viermal – die **grüne LED** leuchtet auf
2. Drücken Sie die kleine Taste dreimal – die **grüne LED** leuchtet auf
3. Drücken Sie die kleine Taste zweimal – die **grüne LED** leuchtet auf
4. Drücken Sie die kleine Taste dreimal – die **rote LED** leuchtet auf

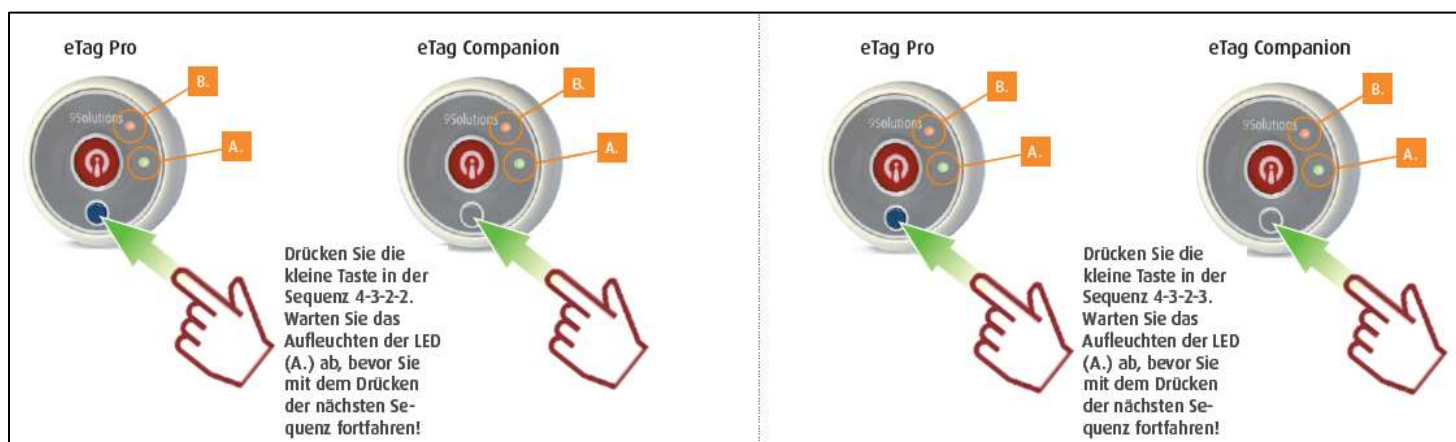

Hinweis:

- Die Aktivierung der Tags ist Tag-spezifisch, d.h., jeder Tag muss einzeln aktiviert und deaktiviert werden.
- Eine Zugangskontrolle kann in 9Solutions Systemen mit jedem 9Solutions Gate aktiviert werden.
- Wird die Zugangskontrolle mit Gates nicht verwendet, wird empfohlen, diese Funktion zu deaktivieren, da dies die Batterie-Lebensdauer erhöht.

Für weitere Informationen senden Sie einfach Ihre Anfrage an office@telecontact.at