


- Hier finden Sie das Programm, mit welchem Sie den APT03 Easywave Pager programmieren können, per Mausklick: [Easywave Pager Programmierung](#)
- Speichern Sie die die **Datei CallEasy.exe** auf dem PC, an dem Sie den Pager konfigurieren wollen
- Stecken Sie nun den Pager am USB-Port an – das Kabel samt Stecker ist im Lieferumfang enthalten – und schalten Sie ihn per Knopfdruck ein (**roter Knopf**)
- Nun zeigt der Pager kurz die Version an und zu wieviel % er aufgeladen ist, die Anzeige erlischt danach wieder
- **Öffnen** Sie die **CallEasy.exe–Datei** durch doppeltes Anklicken – es erscheint dieses **blaue Fenster**:

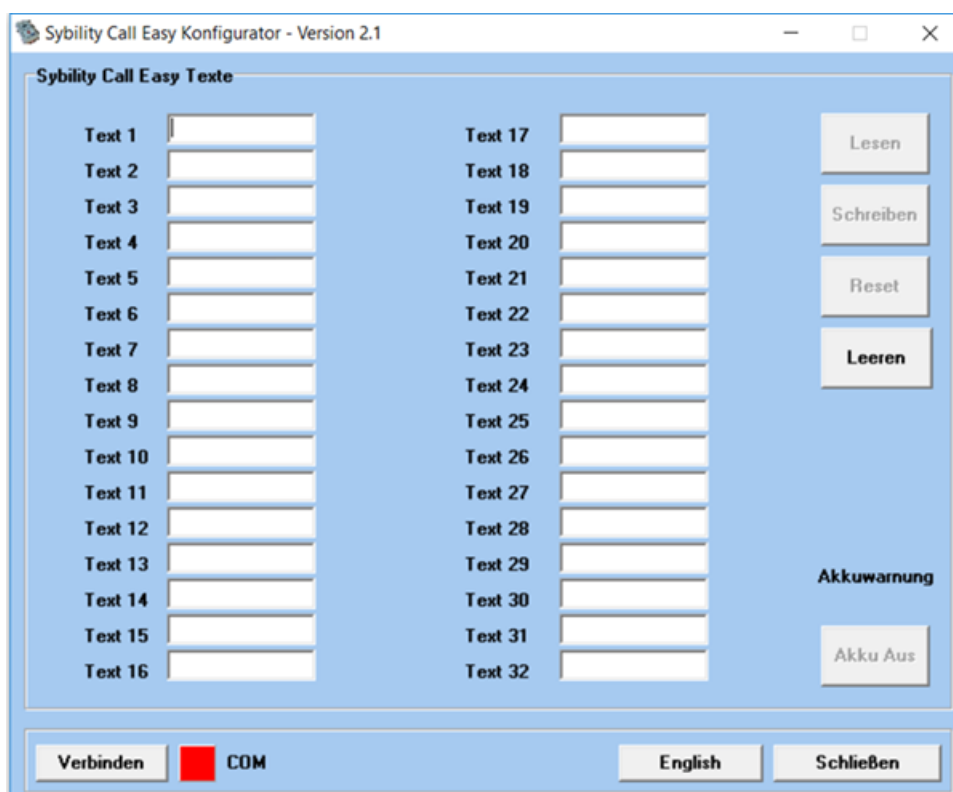

- Nun klicken Sie im blauen Fenster auf „**Verbinden**“ und warten, bis die **rote** COM **grün leuchtet** – die Verbindung ist erfolgt
- Nun klicken Sie im blauen Fenster auf „**Lesen**“ – vorhandene Einträge werden angezeigt
- Sie können jetzt durch Anklicken der weißen Felder (Text x) einen **neuen Eintrag** machen – Beispiel: „*Zi.18 Matte*“ – oder einen bestehenden **Eintrag überschreiben**
- Wenn Sie die Einträge fertig haben, klicken Sie im blauen Fenster auf „**Schreiben**“ – die Einträge werden in den Pager gespeichert

Am PC sind Sie nun fertig und können zu den Sendern (in die Zimmer) gehen, um diese **einzulernen**

1. Dazu **stechen** Sie mit einer Nadel (mitgeliefert) **auf der Rückseite** des Pagers in das **Loch am Clip**
2. Jetzt werden am Pager-Display die zuvor geschriebenen Einträge angezeigt

3. Ist noch keine Programmierung erfolgt, wird „frei“ angezeigt, anderenfalls „belegt“.
4. Durch nochmaligen, **langen Druck der blauen Taste** kommen Sie in den **Lernmodus**, durch kurzen Druck der **blauen** Taste kommen Sie auf die nächste Position.
5. Sind Sie im Lernmodus, **lösen Sie** am Sendegerät (Sensormatte, Daza, Bettfluchtbügel, Türkontakte, usw.) **einen Alarm aus**
6. Fertig! Der Pager programmiert den Sender und beendet den Lernmodus automatisch
7. Wenn Sie jetzt zur Probe neuerlich einen Alarm auslösen, wird dieser am Pager akustisch, optisch und mittels Vibration angezeigt
8. Zur weiteren Programmierung wiederholen Sie die Vorgänge ab Punkt **1.** dieser Anleitung.

Weitere Informationen zu den Pager-Funktionen können Sie in der Bedienungsanleitung des Gerätes nachlesen, welche Sie per Mausklick auch hier zum Ausdruck finden:

[APT03 Easywave Pager Bedienungsanleitung](#)

Unter Punkt „Sender einlernen“ können Sie die hier erklärten Schritte ebenfalls nachlesen.