


Um neue ID-Geber (= Tag) in ein bestehendes PSS System hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

Für das Hinzufügen weiterer ID-Geber ist das PSS-Konfigurationsprogramm erforderlich, welches Sie von unserer Cloud herunterladen können

## [PSS3G Konfigurator](#)

### Vorbereitungsarbeiten

1. Es darf kein ID-Geber in Reichweite des PSS-Lesegerät sein
2. Verbinden Sie nun das PSS-Lesegerät mithilfe eines USB-Kabel mit dem PC oder Laptop
3. Starten Sie das PSS-Konfigurationsprogramm durch Anklicken der konfig.exe – Datei
4. Laden Sie die bestehende Konfiguration durch Klick auf **Daten auslesen**
5. Vorhandene ID-Geber werden rechts in der **TAG-Liste** angezeigt.

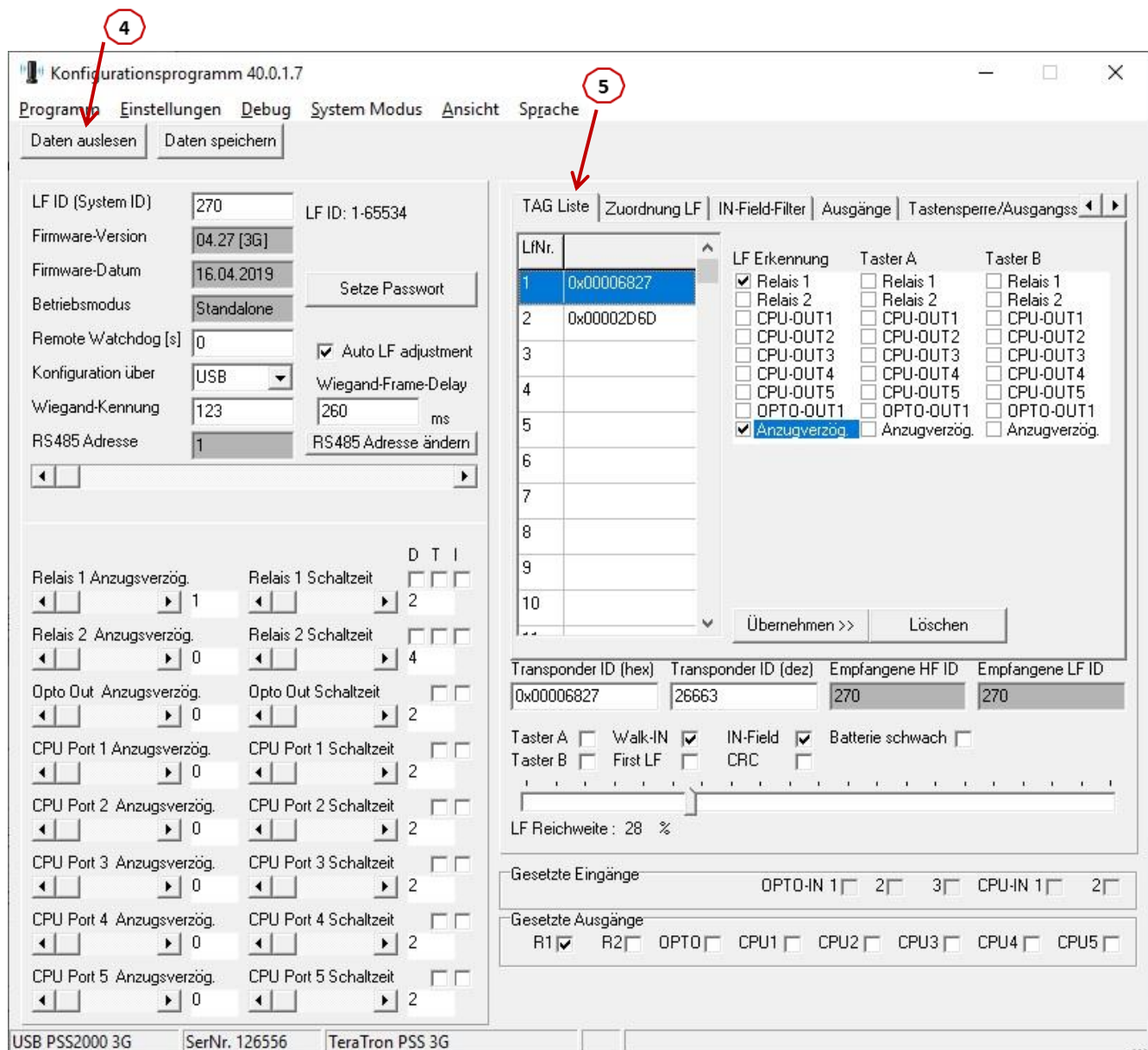


The screenshot shows the 'Konfigurationsprogramm 40.0.1.7' window. The 'Daten auslesen' button is highlighted with a red circle and the number 4. The 'TAG Liste' tab is highlighted with a red circle and the number 5. The TAG list shows two entries: 1 (0x00006827) and 2 (0x00002D6D). The configuration settings on the left include LF ID (270), Firmware-Version (04.27 [3G]), and various output options like Relais, CPU-OUT, and OPTO-OUT. The bottom status bar shows 'USB PSS2000 3G', 'SerNr. 126556', and 'TeraTron PSS 3G'.

## Hinzufügen neuer ID-Geber

6. **Achtung:** Es darf kein ID-Geber in Reichweite des PSS-Lesegerät sein
7. Bringen Sie nun den 1. neuen ID-Geber ins Empfangsfeld
8. Sie erkennen im Feld **Transponder-ID**, wenn das PSS-Lesegerät den ID-Geber erkannt hat
9. Klicken Sie nun auf **Übernehmen >>** - der ID-Geber wird der TAG-Liste hinzugefügt
10. Entfernen Sie nun den ID-Geber wieder aus dem Empfangsfeld des Lesegeräts

Wiederholen Sie die Schritte 7. bis 10. mit allen weiteren ID-Gebern, die Sie hinzufügen möchten.

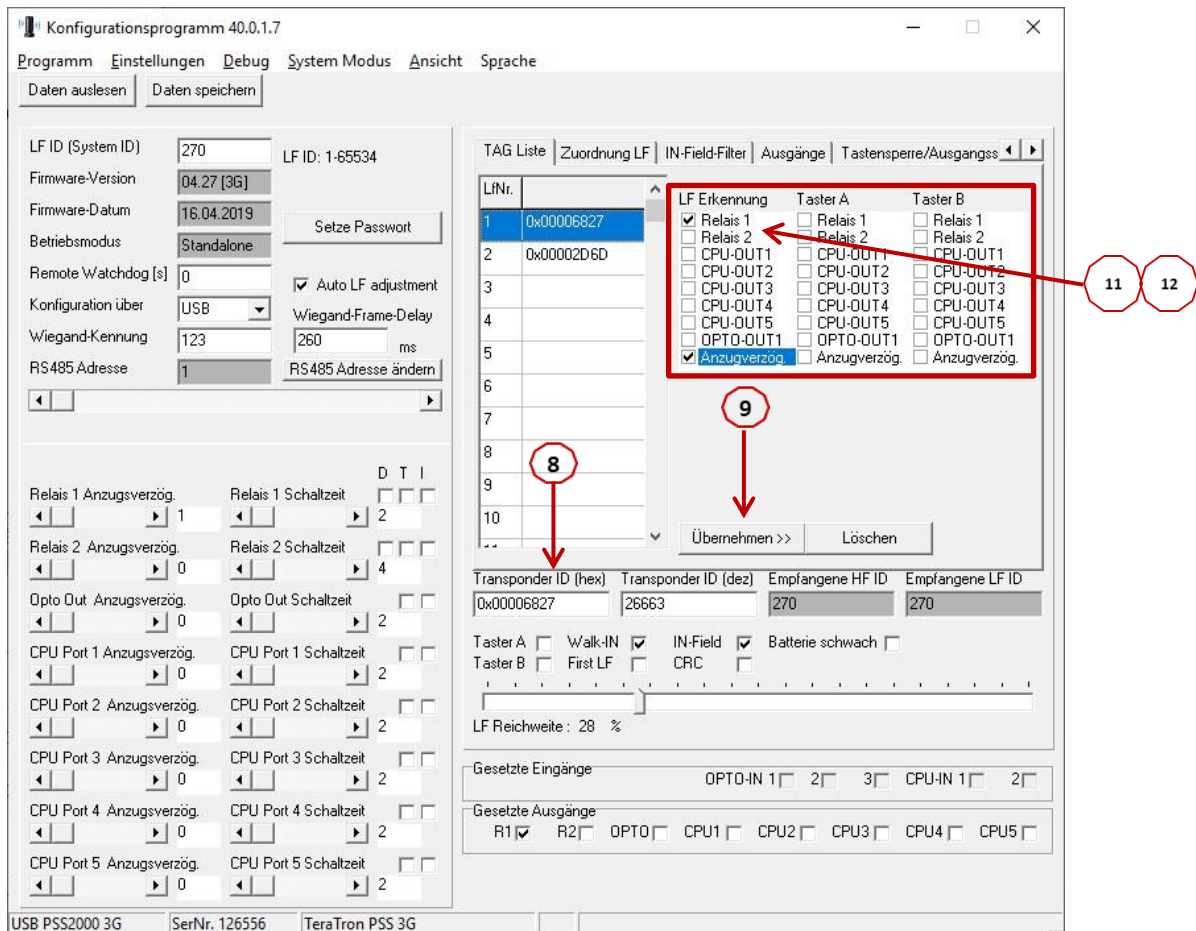

## Zuordnen neuer ID-Geber → Patienten/Bewohner oder Pflegepersonal

Nun müssen die neuen ID Geber noch zum jeweiligen Relais zugeordnet werden, ob diese für Patienten oder das Personal genutzt werden.

11. Zuordnung als Patienten Tag = bei **Relais 1 + Anzugsverzögerung** den Haken setzen
12. Zuordnung als Personal Tag = bei **Relais 2** den Haken setzen
13. Prüfen Sie nun die neu hinzugefügten ID-Geber durch Anklicken in der TAG-Liste
14. Sind alle Einträge korrekt, drücken Sie die Schaltfläche **Daten speichern**

Nach der Datenspeicherung erfolgt ein automatischer Reset des PSS-Lesegeräts. Danach können Sie das Lesegerät wieder an seinen Platz bringen. Die neuen ID-Geber werden nun automatisch erkannt.