


Einlernen eines Senders zu Rufempfänger RCL07-B02

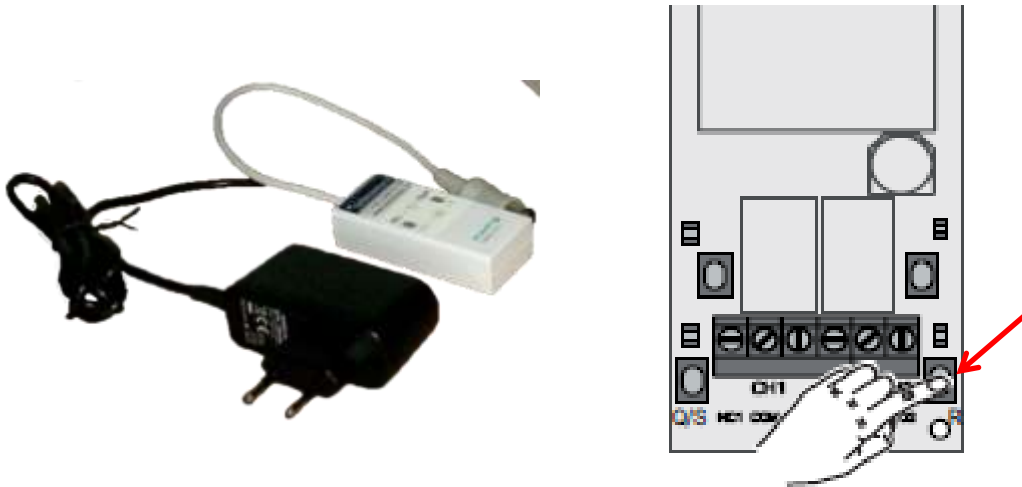

1. Öffnen Sie das Gehäuse des RCL07-B02.
 2. **Löschen** Sie jetzt **alle Sender** wie folgt:
R-Taste drücken, bis die LED rasch blinkt. R-Taste nochmal drücken, bis die LED 4 Sekunden dauerleuchtet. Nach dem Erlöschen der LED sind alle Sender gelöscht.
 3. **WICHTIG:** Stellen Sie vor Beginn sicher, dass **alle Sender** in der Umgebung (Sensormatten, Daza, Bettfluchtbügel, Armband-/Halsband-Sender usw.) **außer Betrieb bzw. Reichweite** sind, um eine Übertragung der Programmierung zu vermeiden.
 4. Stecken Sie den Rufempfänger RCL07 mit dem **Rufanlagen-Anschluss** an der Rufanlage an und verbinden Sie – falls vorhanden – das Netzgerät mit der Steckdose.
 5. **Achtung:** Sollte das **Lämpchen der Programmier Taste (R)** blinken, erkennt der Rufempfänger einen Sender im Umfeld, welcher vor Durchführung des Einlernens noch außer Betrieb genommen werden muss.
 6. **Einlernen eines Rufempfängers mit Quittierung:**
R-Taste <1,6 Sekunden drücken, bis diese langsam blinkt. Nun den Sender (Matte, usw.) auslösen gemäß Punkt 7. Die LED leuchtet 4 Sekunden lang und erlischt dann.
- Einlernen eines Rufempfängers mit Impuls-Schaltung:**
R-Taste <1,6 Sekunden drücken, 1 Sekunde warten und nochmal <1,6 Sekunden drücken. Die LED blinkt nun im 2er-Takt. Nun den Sender gemäß Punkt 7. Auslösen. Die LED leuchtet ca. 4 Sekunden und erlischt.
7. Bringen Sie jetzt den Sender (Sensormatte, Bewegungsmelder, Bettfluchtbügel usw.) in Betriebsbereitschaft unter Beachtung der Wartezeiten nach dem Einschalten gemäß Bedienungsanleitung (beim Daza ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten warten!) und lösen Sie dann einen Ruf aus.
 8. Die Programmierung ist abgeschlossen, wenn das Lämpchen nicht mehr leuchtet.

Ab sofort kann vom Sender (= Sensormatte, Bewegungsmelder, Bettfluchtbügel, Armband-/Halsband-Sender, Notrufkissen, Großruftaster usw.) ein Ruf an den RCL07-B02 erfolgen.