



Einfach in der Anwendung - groß in der Wirkung: Teleguard Bettfluchtbügel!
Made in Austria!



RCL07 Rufempfänger

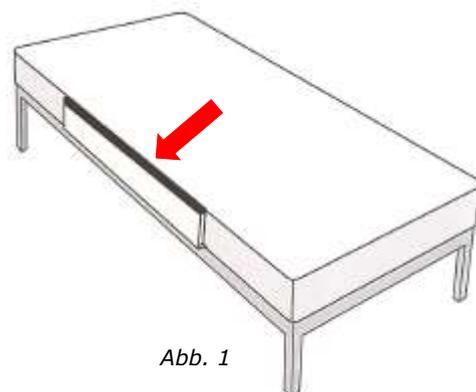


Abb. 1

Teleguard Bettfluchtbügel dienen der Sturzprophylaxe:

Der Bettfluchtbügel wird einfach ins Bett unter die Matratze eingelegt und der zugehörige Rufempfänger entweder an die Schwestern-Rufanlage angeschlossen oder in der Hauspflege in die Steckdose gesteckt – schon ist das System betriebsbereit und meldet, sobald sich die zur Bettruhe verpflichtete Person auf den Bettrand setzt.

Dabei ist der Teleguard Bettfluchtbügel absolut wartungsfrei und bei sorgsamem Umgang unbegrenzt haltbar. Einzig die Batterie gehört getauscht, sobald dies vom Rufempfänger angezeigt wird.

Alle Vorteile im Überblick

- ✓ **drahtlose Funkausführung**
- ✓ auf Wunsch mit **Anschluss an den Schwesternruf**
- ✓ optional einzeln einsetzbar mittels Funkgong
- ✓ **einfachste Montage** durch Einlegen ins Bett unter die Matratze – fertig!
- ✓ kleines, leichtes und handliches Gerät: nur 3,5 kg Eigengewicht
- ✓ robuste, langlebige und **wartungsfreie** Bauweise
- ✓ einfach **auswechselbare Funksender-Batterie** mit Statusprüffunktion
- ✓ Qualität **Made in Austria!**

Kompatible Rufempfänger siehe nächste Seite!



Der **Anschluss an die Schwestern-Rufanlage** erfolgt über einen zuvor gemäß Rufanlagen-
Informationsblatt konfigurierten Rufempfänger.



RCL07-11

Der von uns seit Jahren in der Sturzprävention eingesetzte **Easywave Rufempfänger RCL07** wurde speziell zum Einsatz in der Pflege und den Anschluss an Schwestern-Rufanlagen entwickelt.

Vorteile RCL07-11 Rufempfängers

Eingehende Rufe werden direkt am Gerät angezeigt und quittiert, die Rufsendung kann direkt am Gerät kurzzeitig (15 Minuten) deaktiviert werden mit automatischer Einschaltfunktion nach Ablauf dieser Zeit, und es findet eine Batterie-Statusprüfung statt.

Der **Einzelbetrieb** des Bettfluchtbügels kann wahlweise über einen **Easywave Steckdosen-Funkgong** oder einen **Easywave Mobilen Rufempfänger** erfolgen.

Der **Steckdosen-Rufmelder RCP09** dient der optischen und akustischen Meldung von Personenrufen.

Wird ein Signal vom Sender im Bettfluchtbügel gesendet, ertönt der gewählte Rufton. Die Rufmeldung wiederholt sich zyklisch und wird solange ausgeführt, bis eine Quittierung am Rufmelder erfolgt.

Wahlweise stehen drei Melodien in Kombination mit dem integrierten Blitzlicht zur Verfügung.



RCP09



APT03

Der **APT03** ist ein **mobiler Funk-Meldeempfänger** (Pager) für Personenrufe. Es können bis zu 32 Sender – wie z.B. Armband- / Halsbandsender, Notrufkissen, Sensormatten, Bettfluchtbügel, Bewegungsmelder usw. – eingelernt werden.

Eingegangene Rufe werden akustisch und mittels Vibration signalisiert. Zusätzlich wird im Display ein, vorab am PC konfigurierter Text angezeigt, um eine Zuordnung des Rufes zu ermöglichen. Ein anstehender Ruf wird angezeigt, bis er mit einem Tastendruck quittiert wird.

Der APT03 überwacht den Akkustand und warnt akustisch und mittels Vibration, sobald die Kapazität 10% unterschreitet.

Das Gerät ist bestens geeignet für Pflegeeinrichtungen ohne Schwestern-Rufanlage, Ambulatorien sowie für die Hauspflege.